

Brugsanvisning (til kunden)

A MONTER SKINNEN PÅ BENET

1. Alle 6 stropper løsnes og velcro'en sættes fast bag på stropperne.
2. Placer skinnen på benet siddende med knæet bøjet ca. 30°.
3. Placer bandagen således at midten af skinnerne er ud for toppen af knæskallen.

B FASTGØR STROPPERNE I RÆKKEFØLGE



Ad 1)



Ad 2)



Ad 3)

1. Spænd først den nederste strop foran
2. Derefter spændes den øverste lårstrop bagpå
3. Spænd så den bagerste nederste lårstrop



Ad 4)



Ad 5)




Ad 6)

4. Spænd bagerste lægstrop
5. Spænd forreste strop lige under knæet
6. Til sidst spændes forreste lårstrop -stående

Luk alle stropper fast til, men bekvemt. Efter ca. 15 min. aktivitet løsnes alle stropper, og de strammes så til igen i sammen orden som beskrevet. Dette kan være nødvendigt på grund af hævelse af vævet og kompression.

RENGØRING

Alle puder og stropper kan tages af ved rengøring. Tåler kun håndvask og lufttøring. Til leddene bruges et tørt friktionsnedsættende middel, som f.eks Teflon-spray. Brug ikke våde smøremidler.

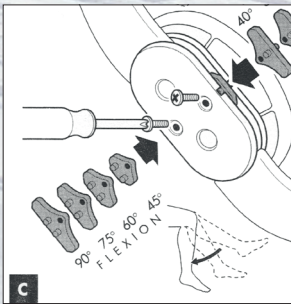

C REGULERING AF LED

Bandagen leveres med standard 10° extensionsstop.

Yderligere fleksions- og extensionsstop medsendes ikke, men skal bestilles separat.

Stoppene er rubriceret i grader som følger:

Extensionsstop: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°

Fleksionsstop: 45°, 60°, 75°, 90°

(Der er ikke monteret fleksionsstop på bandagen ved levering)

For at ændre skinne-stoppene, bruges skruetrækker til at fjerne skruen. Fjern det eksisterende stop, monter nyt stop og fastgør skruen. Det mediale (indvendig) og det laterale (udvendig) stop skal være identisk

Udlejer:



VIDEO: Se her hvordan du tager den på